



Finanzierung und Anschaffung

Die Anschaffung der Rettungsleitsysteme war nur durch die Sponsoren

- Möbelhaus Hackenbracht
- Bäckerei Wahl
- Althaus Raum-Ideen
- Ursula Buschmann
- Kur Apotheke Wolter
- Dirk Schuhmacher

Ein großer Dank gilt allen Kunden, die diese Investition unterstützt haben.

Maßgeblich haben die Spenden im Rahmen der Kalenderaktion zu Realisierung dieses Projektes beigetragen.

Pflege und Unterhaltung


Rettungsleitsystem im Rothaarbad

DLRG Bad Berleburg in Zusammenarbeit mit dem DRK Bad Berleburg

Rettungsleitsystem in Berghausen

Feuerwehr Löschgruppe Berghausen in Zusammenarbeit mit dem DRK Bad Berleburg

Außerdem werden die Geräte durch die Firma Castellan AG aus Kreuztal dauerhaft überprüft und gewartet.

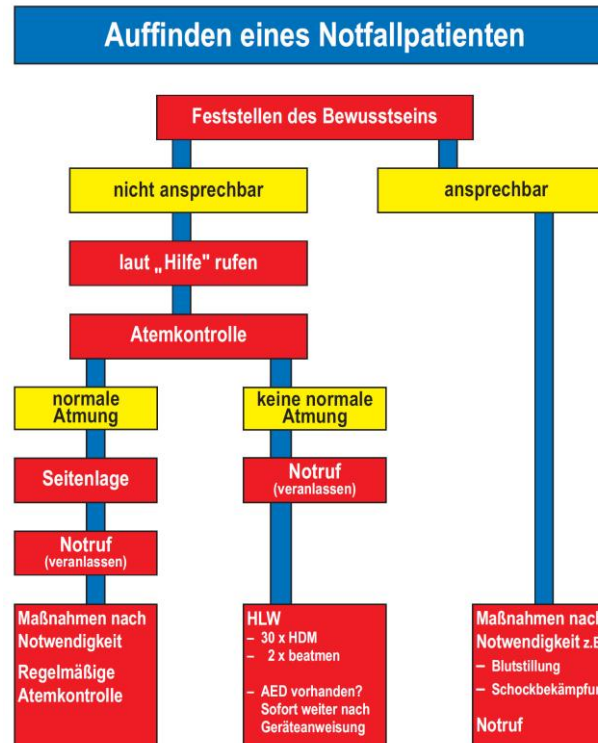

Herausgeber:

DLRG Bad Berleburg e.V.
 Hinterstöpel 42
 Telefon: 02751 / 51585
 E-Mail: info@bad-berleburg.dlrg.de
 Internet: www.bad-berleburg.dlrg.de



Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft e.V.




Jeder kann helfen!

Auch du!



Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft e.V.

Bestandteile des Rettungssystems

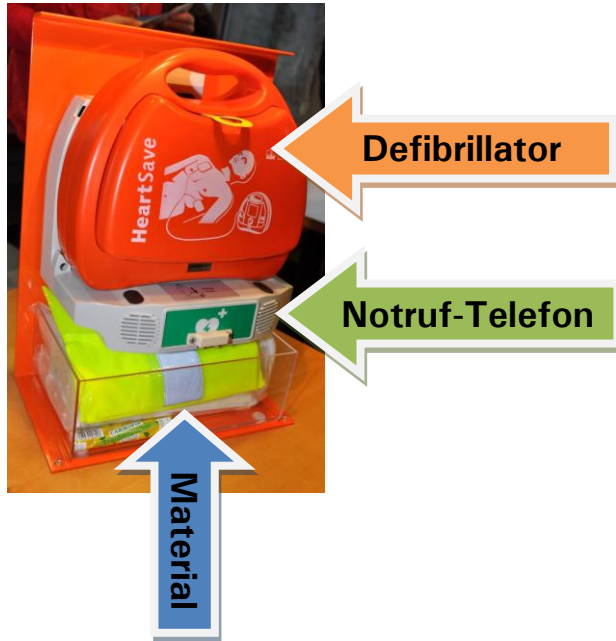

Piktogramme:



Notruftelefon:

Hier ist ein Notruftelefon.



AED:

Hier ist ein **A**utomatisierter **E**xterner **D**efibrillator. Er kann bei Herzkammerflimmern Leben retten.

Vorgehen im Notfall

Bewahren Sie Ruhe

Begeben Sie sich zum Rettungsleitssystem

Öffnen Sie die Klappe

Das System registriert automatisch dass die Klappe geöffnet wurde und stellt über die integrierte Freisprecheinrichtung nach wenigen Sekunden eine Verbindung zur Rettungsleitstelle her.



Entnehmen Sie die Halteeinrichtung



Begeben Sie sich zur hilfsbedürftigen Person. Die Freisprecheinheit ermittelt automatisch die Umgebungslautstärke und passt sich an. Sie nehmen die Rettungsleitstelle mit zur Person. So ist eine qualifizierte Hilfe immer gewährleistet.

Benötigtes Material entnehmen

Enthalten sind:

- Beatmungsmaske
- Defibrillator
- Verbandmaterial
- Traubenzucker
- Warnweste



Defibrillator anwenden



Wenn erforderlich den Deckel des Defibrillators an der gelben Lasche öffnen. Das Gerät wird Ihnen mit Sprachanweisungen sagen was zu tun ist.

Standorte der neuen Rettungsleitssysteme

Rothaarbad
Eingangsbereich
Am Sportfeld 3
57319 Bad Berleburg

Sparkasse Wittgenstein
Filiale Berghausen
Berghäuser Straße 44
57319 Bad Berleburg